

BETRIEBSANWEISUNG



Gem. GefStoffV.

Betrieb/Abteilung:	Zahntechnik Peter Töllner GmbH OL • WHV • DEL						
Arbeitsplatz / Tätigkeit:	Büro & Boten	Arbeits-Vorber.	Keramik	Kunststoff	Kunstst.-Verbl.	Edelmetall	Modellguss
				X			



Gefahrstoffbezeichnung

Signum metal bond II

Gefahr für Mensch & Umwelt

		Flüssigkeit & Dampf leicht entzündbar.
		Verursacht schwere Augenreizung.
		Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
		Kann die Atemwege reizen.


Schutzmaßnahmen & Verhaltens-Regeln

		Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberfl. fernh. Nicht rauchen.
		Explosionssgeschützte elekt. Ger. / Lüftungsanl. / Beleuchtung verwenden.
		Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.
		Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar):
		- Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
		- Haut mit Wasser abwaschen / duschen.
		Bei Kontakt mit den Augen:
		- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
		- Evtl. vorhand. Kontaktlinsen n. Möglichk. entfernen. Weiter ausspülen.
		Unter Verschluss aufbewahren.

Verhalten im Gefahrfall

Notruf: 112	Geeignete Löschmittel: CO ₂ , Sand, Löschpulver, Schaum.
	Ungeeignet: Wasservollstrahl.

Erste Hilfe

	Einatmen: Frische Luft. Bei Unwohlsein ärztl. Hilfe hinzuziehen.
	Hautkontakt: im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
	Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Sofort ärztl. Hilfe.
	Verschlucken: Mund ausspülen. Sofort ärztl. Hilfe. Kein Erbrechen.
siehe Aushang schwarzes Brett im Treppenhaus	
Telefon:	0441 - 60 85 85

Sachgerechte Entsorgung

	Darf mit dem Hausmüll entsorgt werden.
	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
	Entsorgung durch Sonderabfall-Verbrennung in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.

Datum:	01.01.2020	Unterschrift:	
--------	------------	---------------	--