

BETRIEBSANWEISUNG


Gem. GefStoffV.

Betrieb/Abteilung:	Zahntechnik Peter Töllner GmbH OL • WHV • DEL						
Arbeitsplatz / Tätigkeit:	Büro & Boten	Arbeits-Vorber.	Keramik	Kunststoff	Kunstst.-Verbl.	Edelmetall	Modellguss
				X		X	



Gefahrstoffbezeichnung

Pattern Resin LS Pulver

Gefahr für Mensch & Umwelt

	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
	Verursacht schwere Augenreizungen.


Schutzmaßnahmen & Verhaltens-Regeln

		Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
		Einatmen von Staub vermeiden.
		Schutzhandschuhe tragen.
		Bei Hautreizung oder -ausschlag:
		Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
		Bei Berührung mit der Haut:
		Mit viel Wasser und Seife waschen.
		Dichtschießende Schutzbrille

Verhalten im Gefahrfall

Notruf: 112	Geeign. Löschm.: CO ₂ , Löschpulver, Wassersprühstr.
	Bei größerem Brand m. Wassersprühstr. oder alkoholbeständ. Schaum bek.
	Aus Sicherheitsgründen ungeeign. Löschm.: Wasser im Vollstrahl

Erste Hilfe

	Einatmen: Frischluftzuf., bei Beschwerd. Arzt aufsuchen. bei Bewusst.: Stab.		
	Hautkontakt: Sofort mit Wasser & Seife waschen, ärztl. Behandl. zuführen		
	Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen. B. Beschw. Arzt konsult.		
	Verschlucken: Mund ausspülen, reichl. Wasser nachtr., b. Beschw. Arzt		
siehe Aushang schwarzes Brett im Treppenhaus		Telefon:	0441 - 60 85 85

Sachgerechte Entsorgung

	Entsorgung durch Sonderabfall-Verbrennung in Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen.
	Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Datum:	01.01.2020	Unterschrift:	
--------	------------	---------------	--